

A Bathmate Hydropump egy külső péniszmerevítő eszköz, amely a vákuumtechnikával biztosítja a megfelelő, nemi aktushoz szükséges péniszmerevséget

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót mielőtt megvásárolná a Bathmate Hydropumpát!

HASZNÁLAT ELŐTTI FIGYELMEZTETÉS

- A készülék használata előtt konzultáljon orvosával, ha az alábbiak bármelyike fennáll: merevedési zavar, cukorbetegség, sclerosis multiplex, májcirrózis, krónikus veseelégtelenség, alkoholizmus, fokozott szív- vagy légzési arány, szív- vagy tüdőbetegség, magas vérnyomás, stroke, epilepszia, vizeleti rendellenességek (pl. vese-, hólyag- vagy nemi szervi problémák) vagy leukémia
- Ne használja ezt a készüléket, ha:
 - Sarlósejtes betegségben szenved
 - Önnek korábban elhúzódó erekciója volt
 - Ön bármilyen vérzési rendellenességben szenved, vagy jelenleg vérhígító gyógyszert, például aszpirint szed
- A hidropumpa higiéniai okok miatt csak személyes használatra ajánlott
- A Bathmate hidropumpa vízben való használatra készült, ezért síkosító anyag használata nem indokolt
- A vákuumkioldó mechanizmus önálló működtetéséhez rendeltetés szerűen használható kézre van szüksége. Csökkent kézerő (betegség, baleset stb.) miatt a készülék biztonságos eltávolítása nehézkes
- a termék használata folyamatos kontrollt igényel, így kerülje az elalvást a Hydropump használata közben
- Ne használja a készüléket alkohol vagy drog hatása alatt, mert ez ronthatja ítélőképességét és növelheti a hímvessző sérülésének kockázatát
- Soha ne használja a készüléket, ha a pénisz területén rendellenesen működik a fájdalomérzete, mert ez elősegítheti a készülék által esetlegesen fellépő sérülések kockázatát
- A vákuumpumpa használata okozhat zúzódást vagy megrepesztheti a péniszen vagy a herezacskóban lévő ereket, ami petechiákat, vérzést vagy a haematoma kialakulásához vezethet
- A vákuumszivattyú használata súlyosbíthatja a már fennálló állapotokat, mint például a Peyronie-kór, a priapizmus és a húgycső szűkületei

- A készülék helytelen használata a pénisz sérüléséhez vezethet
- Ha súlyos fájdalom vagy kellemetlen érzés jelentkezik, azonnal hagyja abba a használatát és forduljon orvosához

**Minden jog fenntartva! ez a tartalom szellemi tulajdon, annak részleteit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel a jogtulajdonos/szerző (Rendez-Vous Bt./Bozsik Sándor) engedélye nélkül közölni.*

Ajánlott felhasználás!

A Hidropump optimális előnyeinek kihasználása érdekében és a nem megfelelő használat okozta sérülések elkerülése érdekében, javasoljuk, hogy kövesse az alábbiakban ismertetett utasításokat!

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:

- Mossa el a hidropumpát meleg, szappanos vízzel, és alaposan öblítse le
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a szeméremterülete megfelelően szőrtelenítve van, mert ez megkönnyíti a vákuum zárását a kismedence felületén
- Néhány perces relaxációra van szükség a meleg zuhany alatt vagy fürdőkádban, hogy a pénisz izomzata kellőképpen ellazuljon és felkészüljön a nyújtás folyamatára
- Csak az erekció eléréséhez szükséges minimális vákuumnyomást alkalmazza. Túlzott vákuumnyomás és erőteljes szivattyúzás véraláfutást vagy a pénisz sérülését okozhatja
- Az erekciós keménység és az optimális véráramlás érdekében a legjobb, ha 2-3 percenként eltávolítja a készüléket, és hagyja, hogy a pénisz visszahúzódjon, ezután 2 percig masszírozza a péniszét lankadt állapotban, majd helyezze vissza a készüléket, és ismétlje meg a folyamatot. Ezt legfeljebb háromszor kell megismételnie egy 15 perces gyakorlat, használat során
- 24 órán belül ne használja a Hidropumpát 15 percnél hosszabb ideig

Hogyan működik a Hidropumpa

A hidropumpa úgy működik, hogy vákuum ellenállást hoz létre a használó szeméremterületével szemben, elszigetelve ezzel a lankadt péniszt. Amikor a pumpát megnyomják befelé a testtel szemben a gumihenger összenyomódik, és a pumpa végéből a nyitott szelepen keresztül távozik a víz. Amikor felengedi a pumpát a gumiharang kitágul és a szelep automatikusan bezárul, így részleges vákuum keletkezik a pumpa belsejében. Ez a pénisz tágulását és vérrel való kitöltését eredményezi, ami erekciót eredményez

A ritmikus újra pumpálás növeli a vákuumot, és ezáltal növeli az erekció méretét

A használó úgy szabályozhatja a vákuum erősségét, hogy a szelepházat befelé nyomja a rugóval szemben, kinyitva a szelepet, és levegőt vagy vizet enged vissza a pumpa hengerbe, ezáltal részben vagy teljesen megszüntetve a vákuumot

A Bathmate hidropumpa vákuumát a harmonika szerű gumihenger rugalmas visszahúzódása hozza létre, ezáltal a használója nem terhelheti túl az európai és amerikai orvosi előírások szerinti megengedett biztonságos vákuum teljesítményét

FONTOS!

A szelep tetején lévő fekete gombot befelé nyomva, jobbra vagy balra mozdítva kapcsolhatja azt, a stabil állapotot pedig egy erőteljes kattánás jelzi

A szelepet csak akkor állítsa zárt helyzetbe, amikor a hidropumpát zuhany alatt használja, vízzel feltöltve, minden más esetben a fekete gombnak középen kell állnia (nyitott) helyzetben, ellenkező esetben, megakadályozhatja a Hidropumpa megfelelő működését

**Minden jog fenntartva! ez a tartalom szellemi tulajdon, annak részleteit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel a jogtulajdonos/szerző (Rendez-Vous Bt./Bozsik Sándor) engedélye nélkül közölni.*

Hidropumpa használata a zuhany alatt:

1. Relaxáljon néhány percig a meleg zuhany alatt
2. Kapcsolja a fekete gombot zárt helyzetbe, vegye ki a kényelmi betétet, ha van (típustól függően), hogy megakadályozza a levegőbuborék bennmaradását, majd töltsse fel a Hidropumpa színültig, akár túlcsordulva is
3. Helyezze vissza a kényelmi betétet, ha van
4. Helyezze a lankadt péniszét a Hidropumpába, szorosán a medencefelé nyomva
5. Forgassa kicsit jobbra-balra, hogy megbizonyosodjon a megfelelő zárásról és hogy a herék kényelmesen kívül maradjanak
6. Ha felkészült, akkor nyissa ki a szelepet a fekete gomb közepre állításával és kezdje meg a hidropumpa lassú benyomását a medence irányába
7. Lassan és egyenletesen pumpáljon mindaddig, amíg a szelep nyomva marad, ami azt jelzi, hogy az optimális vákuumot elérte
8. A hidropumpa eltávolításához engedje le a vákuumot, a szelepház befelé nyomásával aktiválja a gyorskioldó mechanizmust, majd óvatosan húzza le a pumpa hengert a péniszéről

Hidropumpa használata a kádban

1. Relaxáljon néhány percig a fürdőkádban
2. Vegye ki a kényelmi betétet, ha van (típustól függően), hogy megakadályozza a levegőbuborék benmaradását, majd töltsse fel a Hidropumpa színülig
3. Helyezze vissza a kényelmi betétet, ha van
4. Helyezze a lankadt péniszt a Hydropumpába, szorosan a medencefelé nyomva
5. Forgassa kicsit jobbra-balra, hogy megbizonyosodjon a megfelelő zárásról és hogy a herék kényelmesen kívül maradjanak
6. Ha felkészült, akkor nyissa ki a szelepet a fekete gomb közére állításával és kezdje meg a hidropumpa benyomását a medence irányába
7. Lassan és egyenletesen pumpáljon mindaddig, amíg a szelep nyomva marad, ami azt jelzi, hogy az optimális vákuumot elérte
8. A hidropumpa eltávolításához engedje le a vákuumot, a szelepház befelé nyomásával aktiválja a gyorskioldó mechanizmust, majd óvatosan húzza le a pumpa hengert a péniszéről

Tisztítás és karbantartás

Mossa ki a hidropumpát meleg szappanos vízzel, és alaposan öblítse le. Hagyja száradni a Hydropumpát, majd tárolja száraz, sötét (napfénytől védett) helyen.

Garancia és feltételei

A Bathmate Hydropump úgy lett kialakítva, hogy többéves gondtalan használatot biztosítson. A termékre 2 éves gyártói garancia érvényes amennyiben a Hidropumpát a termékazonosító kóddal (PID) regisztrálja a

www.bathmatedirect.com/support weboldalon

Termékazonosító kód (PID)

A Bathmate hidropumpa egyedi 6 karakteres PID kóddal rendelkezik, amely a hidropumpa dobozán vagy a mellékelt kártyán található. Ez a kód biztosítja az eredetiséget és bizonyítja, hogy valódi terméket vásárol, nem pedig rossz minőségű hamisítványt, másolatot.


**Minden jog fenntartva! ez a tartalom szellemi tulajdon, annak részleteit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel a jogtulajdonos/szerző (Rendez-Vous Bt./Bozsi Sándor) engedélye nélkül közölni.*

*Minden jog fenntartva! ez a tartalom szellemi tulajdon, annak részleteit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel a jogtulajdonos/szerző (Rendez-Vous Bt./Bozsik Sándor) engedélye nélkül közölni.


Hydropump

szelepgomb beállítása

szelepgomb
szelepház
automata
vákuum mechanizmus

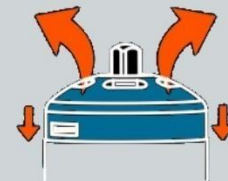


használat közben csak a hengert fogja hogy az automata vákuum mechanizmus és a gumiharang működése biztosítva legyen!

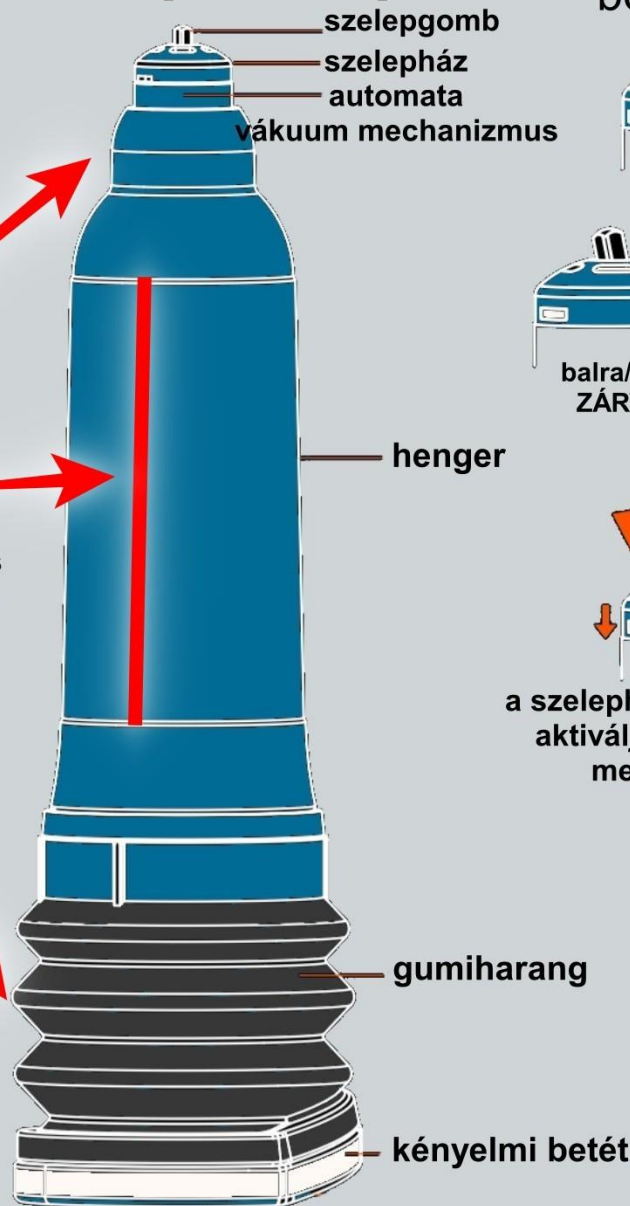

*Minden jog fenntartva! ez a tartalom szellemi tulajdon, annak részleteit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel a jogtulajdonos/szerző (Rendez-Vous Bt./Bozsik Sándor) engedélye nélkül közölni.

**Minden jog fenntartva! ez a tartalom szellemi tulajdon, annak részleteit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel a jogtulajdonos/szerző (Rendez-Vous Bt./Bozsik Sándor) engedélye nélkül közölni.*

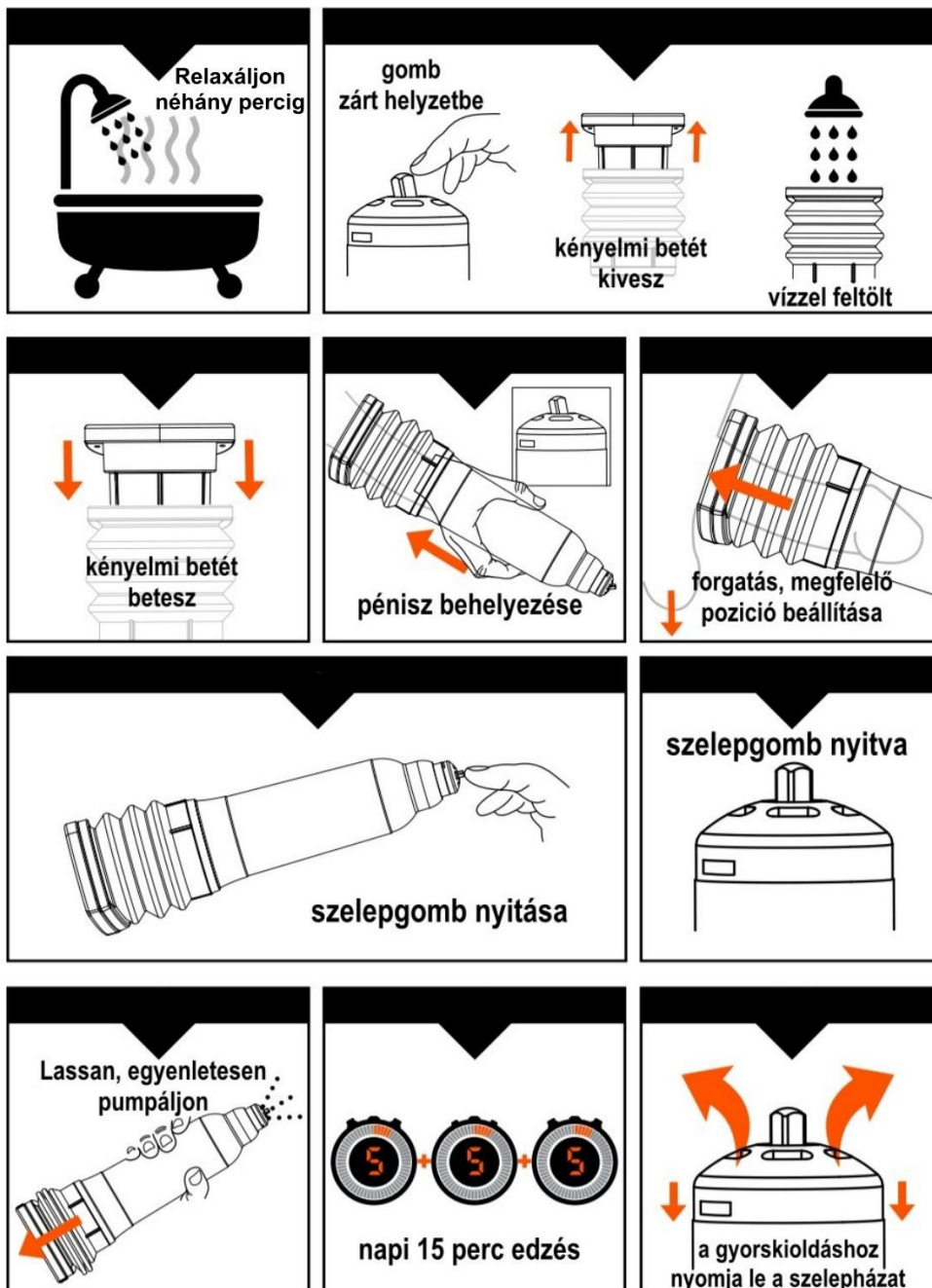

**Minden jog fenntartva! ez a tartalom szellemi tulajdon, annak részleteit tilos reprodukálni, bármilyen formában vagy eszközzel a jogtulajdonos/szerző (Rendez-Vous Bt./Bozskik Sándor) engedélye nélkül közölni.*